



## Oxivir Excel® CE

### Detergente desinfetante de largo espectro indicado para dispositivos médicos não invasivos e superfícies duras não porosas

#### Descrição

Diversey Oxivir Excel é um detergente desinfetante concentrado, com eficácia de largo espectro. Limpa e desinfeta num único passo, com um tempo de contacto extremamente reduzido. Com uma formulação à base de peróxido de hidrogénio acelerado (AHP), patenteado pela Diversey, podendo ser utilizado em dispositivos médicos não invasivos.

#### Propriedades

- Bactericida, Virucida, Leveduricida
- Desinfeta em menos de um minuto
- Seguro para os utilizadores e para as superfícies
- Poder de limpeza efetivo
- Prático, não necessita de preparação
- Sem perfume
- Os agentes ativos dão origem a água e oxigénio
- Não necessita de enxaguamento

#### Benefícios

- Ampla eficácia, proporcionando elevados níveis de proteção dos pacientes. Extensivamente testado de acordo com diversas normas Europeias e eficaz contra diferentes tipos de agentes patogénicos. Tem eficácia virucida, incluindo Poliovirus, Adenovirus, e Murine norovirus, sendo considerado eficaz em todo o tipo de vírus encapsulados, tais como: HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus e Coronavirus.
- Tempos de contacto reduzidos, asseguram uma desinfeção eficaz
- Excelente poder de limpeza, incluindo descalcificação, dispensando assim a necessidade de limpeza prévia
- Seguro para os utilizadores, reduzindo risco de acidentes de trabalho. Quando diluído, não tem advertências de perigo, nem é irritante para as vias respiratórias
- Fórmula à base de AHP, não danifica as superfícies, aumentando o tempo de vida dos equipamentos
- Adequado para usar em zonas de alto risco, como áreas hospitalares, incluindo BO, UCI, UCIN e enfermarias. Não utilizar em dispositivos médicos invasivos

#### Instruções de utilização


##### Limpeza e desinfeção por pulverização:

1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar pulverizando o pano ou diretamente na superfície, usando uma garrafa pulverizadora.
3. Após o tempo de contacto\*, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um pano ou papel.

\*Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.

CE  
0088

AHP®  
Patented

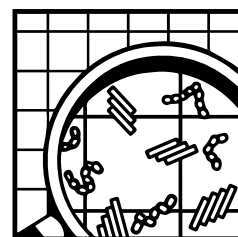

© A.I.S.E.



# Oxivir Excel® CE

## Limpeza e desinfecção através do método de balde:

1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar sobre a superfície, usando uma mopa/pano.
3. Após o tempo de contacto\*, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um pano ou papel.
4. Mudar a solução sempre que necessário, ou no mínimo a cada 24 horas.

## Dry Wipes Dispensador de Toalhetes Descartáveis:

1. Preparar o sistema Dry Wipes Dispensador de Toalhetes Descartáveis, de acordo com as instruções.
2. Remover a sujidade difícil.
3. Retirar apenas um toalhete e limpar a superfície.
4. Após o tempo de contacto\*, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um pano ou papel.
5. Substituir o toalhete quando estiver visivelmente sujo ou sempre que mudar para outra área a limpar.

\* *Garantir que a superfície se mantém molhada durante o tempo de contacto.*

## Dosagem:

Para atingir resultados de desinfecção, seguir a dosagem recomendada (ver tabela).

## Dados Técnicos

Aspetto: Líquido incolor

pH (puro): 0,55

pH (em uso): 1,95

Densidade relativa (20 °C): 1,000

*Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.*

## Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – [sds.diverseyl.com](https://sds.diverseyl.com). Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas. Apenas para uso profissional/especialistas. Reage com substâncias oxidáveis. Validade do produto: 2 anos após a data de fabrico.

## Compatibilidade do produto

Não misturar com outros produtos químicos. Não usar água quente. Não usar em superfícies sensíveis à água e a ácidos. Segundo as recomendações de utilização, Diversey Oxivir Excel CE é adequado para uso na maioria dos materiais normalmente encontrados na área hospitalar.

## Informação ecológica

Os surfactantes utilizados estão em conformidade com os requisitos da regulação europeia de detergentes, EC648/2004.

## Dados microbiológicos

Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias EN: EN13727, EN13697, EN13624, EN14476 e EN16615



# Oxivir Excel<sup>®</sup> CE

Atividade de desinfecção	Testes EN condições sujas	Tempo de contacto	Diluição	ml/1L água
Bactericida	EN13727	30 segundos	2%	20 ml
	EN13697	5 minutos	1,5%	15 ml
	EN16615	1 minuto	1%	10 ml
Leveduricida	EN13624	5 minutos	4%	40 ml
	EN13697	5 minutos	3,5%	35 ml
	EN16615	1 minuto	1%	10 ml
Virucida	EN14476	5 minutos	2%	20 ml