



Oxivir Excel® Foam CE

Detergente desinfetante de largo espectro

Descrição

Diversey Oxivir Excel Foam é um detergente desinfetante pronto a usar, com eficácia de largo espectro. Limpa e desinfeta num único passo, com um tempo de contacto extremamente reduzido. Com uma formulação à base de peróxido de hidrogénio acelerado (AHP), patenteado pela Diversey, Oxivir Excel Foam pode ser usado em dispositivos médicos não invasivos e equipamentos.

Propriedades

- Bactericida, Virucida, Leveduricida
- Desinfeta em menos de um minuto
- Seguro para os utilizadores e para as superfícies
- Poder de limpeza efetivo
- Prático, não necessita de preparação
- Sem perfume
- Os agentes ativos dão origem a água e oxigénio
- Não necessita de enxaguamento


Benefícios

- Ampla eficácia, proporcionando elevados níveis de proteção dos pacientes. Extensivamente testado de acordo com diversas normas Europeias e eficaz contra diferentes tipos de agentes patogénicos. Tem eficácia virucida, incluindo Poliovirus, Adenovirus, e Murine norovirus, sendo considerado eficaz em todo o tipo de vírus encapsulados, tais como: HIV, HBV, HCV, Influenza, Vaccinia virus e Coronavirus.
- Tempos de contacto reduzidos, asseguram uma desinfeção eficaz
- Excelente poder de limpeza, incluindo descalcificação, dispensando assim a necessidade de limpeza prévia
- Seguro para os utilizadores, reduzindo risco de acidentes de trabalho. Quando diluído, não tem advertências de perigo, nem é irritante para as vias respiratórias
- Fórmula à base de AHP, não danifica as superfícies, aumentando o tempo de vida dos equipamentos
- Adequado para usar em zonas de alto risco, como áreas hospitalares, incluindo BO, UCI, UCIN e enfermarias. Não utilizar em dispositivos médicos invasivos.

Instruções de utilização

Limpeza e desinfeção por pulverização:

1. Remover a sujidade difícil.
2. Aplicar pulverizando o pano ou diretamente na superfície, usando uma garrafa pulverizadora.
3. Após o tempo de contacto*, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um toalhete seco.

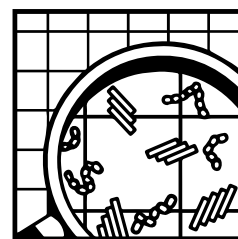

© A.I.S.E.

**Os níveis de dosagem foram estabelecidos para condições ideais de utilização, pelo que poderão variar de acordo com a situação de cada cliente (dureza da água, nível de sujidade, procedimentos). Para informação mais detalhada, consulte, por favor, o seu representante Diversey.*



Oxivir Excel® Foam CE

Dry Wipes Dispensador de Toalhetes Descartáveis:

1. Preparar o sistema Dry Wipes Dispensador de Toalhetes Descartáveis, de acordo com as instruções.
2. Remover a sujidade difícil.
3. Retirar apenas um toalhete e limpar a superfície.
4. Após o tempo de contacto*, deixar secar ao ar, ou secar com a ajuda de um toalhete seco.
5. Substituir o toalhete quando estiver visivelmente sujo ou sempre que mudar para outra área a limpar.

* *Garantir que a superfície se mantém molhada durante o tempo de contacto*

Dados Técnicos

Aspeto: Líquido incolor, transparente

Odor: Neutra

pH (em uso): 1,95

Densidade relativa (20 °C): 1,000

Ponto de inflamação (°C): N/A

Validade: 720 dias

Os dados acima correspondem a valores típicos e não devem ser considerados como especificação.

Segurança na armazenagem e manuseamento

Um guia completo sobre manuseamento e eliminação deste produto é fornecido em separado na Ficha de Dados de Segurança (FDS) – sds.diversey.com. Armazenar fechado na embalagem original, afastado de temperaturas extremas.

Apenas para uso profissional/especialistas.

Reage com substâncias oxidáveis. Validade do produto: 2 anos após a data de fabrico.

Compatibilidade do produto

Não misturar com outros produtos químicos. Não usar água quente. Não usar em superfícies sensíveis à água e a ácidos. Segundo as recomendações de utilização, Diversey Oxivir Excel Foam CE é adequado para utilização na maioria dos materiais normalmente encontrados.

Dados microbiológicos

Eficácia comprovada de acordo com as normas europeias EN: EN1276, EN1650, EN13727, EN13624, EN14476 e EN16615.

Informação ecológica

Os surfactantes utilizados estão em conformidade com os requisitos da regulação europeia de detergentes, EC 648/2004.