


## 1 Maske ablegen

Waschen Sie sich vor dem Start mindestens 20 Sekunden lang die Hände mit einer antibakteriellen Seife. Beugen Sie sich leicht nach vorne und entfernen Sie die Gummibänder von Ihren Ohren. Nehmen Sie die ganze Maske in einer Vorwärtsbewegung vom Kopf weg ab. Vermeiden Sie es, die Vorderseite der Maske zu berühren.




## 2 Zum Waschen sammeln

Sammeln Sie Gesichtsmasken in einem SEPARATEN Beutel, der nur für kontaminierte Textilien verwendet wird. Legen Sie die Masken mit ähnlichen Farben in je einen Beutel, um eine Sortierung vor dem Waschen zu vermeiden. Schließen Sie den Beutel. Waschen Sie sich nach dem Platzieren der Maske in den Wäschesack nochmals die Hände mit einer antibakteriellen Seife oder desinfizieren Sie sich die Hände.

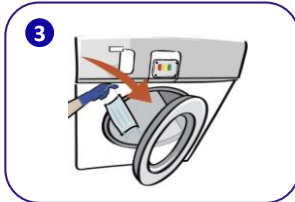

## 3 Beladen der Waschmaschine

Tragen Sie eine geeignete Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß den örtlichen Richtlinien. Potenziell infizierte Textilien nicht sortieren oder vorbehandeln, sondern direkt in die Maschine legen. Beladen Sie die Maschine mit verschmutzten Textilien ähnlicher Farben, ca. 85% der Waschmaschinenkapazität. Reinigen und desinfizieren Sie die Berührungspunkte der Maschine (Griffe, Tür, Schalttafel usw.) nach jedem Gebrauch. Entfernen und entsorgen Sie die PSA. Waschen Sie Ihre Hände.

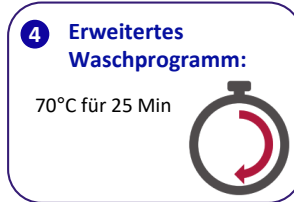

## 4 Erweitertes Waschprogramm:

70°C für 25 Min


## Wählen Sie den geeigneten Zyklus

Befolgen Sie ein örtlich zugelassenes Waschverfahren zur thermischen Desinfektion oder chemothermischen Desinfektion. Alternativ können Sie die oben genannten WHO-Richtlinien befolgen. Um einen vollständigen Wasch- und Desinfektionsprozess zu erreichen, verwenden Sie eines der Diversey Wasch- und Desinfektionsmittel oder eine Kombination aus Wasch- und Desinfektionsmittel gemäß den Anweisungen.



## 5 Masken / Textilien herausholen

Bevor Sie die Maschine öffnen waschen Sie Ihre Hände mit einer antibakteriellen Seife, mindestens 20 Sekunden lang. Entladen Sie saubere Textilien in einen REINEN Wagen oder Korb.

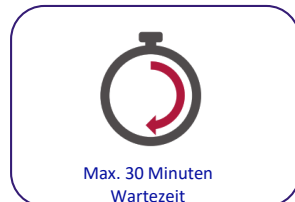

Max. 30 Minuten  
Wartezeit

## Masken / Textilien sammeln

Die Wartezeit zwischen dem Ende des Waschprozesses und dem Beginn der Trocknung muss so kurz wie möglich gehalten werden. Maximale Wartezeit [nass] = 30 Minuten



## Wäschetrockner beladen

Beladen Sie den Trockner auf das für Ihre Maschine geeignete Ladegewicht. Verwenden Sie eine maximale Temperatur von 60°C. Lufttrocknung wird nicht empfohlen, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden. Reinigen und desinfizieren Sie nach jedem Gebrauch die Berührungspunkte der Maschine (Griff, Bullauge, Schalttafel usw.), sobald der Prozess gestartet wird.



Tragen Sie geeignete PSA in Übereinstimmung mit den örtlichen Richtlinien. Falls nicht verfügbar, befolgen Sie die WHO-Richtlinien für das Tragen von PSA.

## Chemo-thermische Desinfektion

### Option 1



**Clax DS Desotherm – 2in1**  
Enzymatisch, phosphatfrei, pulver Wasch-/ Desinfektionsmittel

Viruzide Wirksamkeit basierend auf EN 14476 (Murines Parvovirus). RKI AB-Liste verfügbar.

### Option 2



**Clax Personal**  
Hochwirksames Bleich-/Desinfektionsmittel für das Waschen bei niedrigen Temperaturen. Immer in Kombination mit Waschmittel verwenden. Viruzide Wirksamkeit basierend auf EN 14476 (Murines Parvovirus). Im Gebrauch mit Clax Profi RKI AB-Liste verfügbar.

Für vollständige Reinigung und Desinfektion zusammen mit folgendem Waschmittel verwenden:



**Clax Profi**  
Flüssiges Alleinwaschmittel.