

Limpar e desinfetar dispositivos eletrônicos com Oxivir® Excel

Preparação e procedimento



1 Retirar um toallete da embalagem.




2 Retirar o excesso de líquido do toallete antes de limpar qualquer tipo de dispositivo, ranhuras ou portas.



3 Desligar o dispositivo eletrônico.** Limpar suavemente o dispositivo eletrônico usando um toallete Oxivir® Excel. Ao limpar um ecrã de visualização, limpar numa única direção.

A superfície deve permanecer molhada durante 30 segundos.

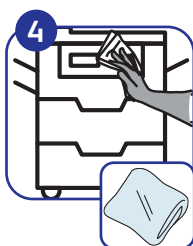

4 Limpar com um pano seco ou papel para remover qualquer resíduo.




5 Eliminar o toallete num recipiente para lixo e nunca numa sanita. É possível colocar no recipiente de resíduos de plástico para reciclagem.

**Consulte a política da sua empresa ou as recomendações do fabricante relativamente a instruções de limpeza.


Dispositivo eletrónico



Monitores e computadores

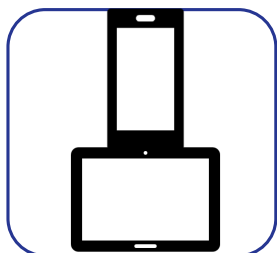

Telefones e tablets

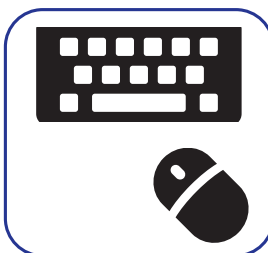

Teclados e ratos



Impressoras, scanners, fotocopiadoras

Benefícios do Oxivir® Excel Wipe



EFICÁCIA

Eficácia virucida total em apenas 30 segundos (Coronavírus). Permite a eliminação de um largo espectro de vírus, bactérias e leveduras no menor tempo de contacto.



SEGURANÇA

Segurança para os utilizadores, sem necessidade de EPI. Compatível com as superfícies, não inflamável. Os toalhetes Oxivir® eliminam a probabilidade de aerossóis aumentam a eficácia da desinfecção em 35%.



EFICIÊNCIA

Limpeza e desinfecção num único produto permite melhorias significativas na eficiência do trabalho. Utilização fácil com o mínimo de formação necessária. Com os toalhetes Oxivir® Excel, o aumento da eficiência pode chegar aos 23%. Desempenho superior com tensoativos de elevada eficácia que proporcionam resultados de limpeza acima da generalidade das tecnologias desinfetantes.



SUSTENTABILIDADE

Os ingredientes ativos decompõem-se em água e oxigénio, tornando-se muito mais seguros para o ambiente e para os utilizadores. Os produtos Oxivir® estão isentos de Alquilfenol Etoxilados (APE), Nonilfenol Etoxilados (NPE) e Compostos Orgânicos Voláteis (COV)

Pretende saber mais?
Contacte o representante da Diversey.
www.diversey.com