

# COVID-19 簡易抗原 (PCR) 検査キット

新型コロナウイルスの検査システムを  
ご用意させて頂いております。

個人検査用

測定時間 **15分**



## COVID-19 簡易抗原(PCR) 検査キットについて



### 安心のCEマーク付き！

商品がEU加盟国で販売するにあたっての  
全ての基準を満たすものに付けられる基  
準適合マークです。

◀ EU適合宣言書

分かること	現在感染しているか
検体	鼻や喉の奥の粘液
調べるもの	ウイルス特有のタンパク質
判定時間	15分

総販売元



株式会社サンライズジャパン

〒150-0036 東京都渋谷区南平台町12-11アンジェパティオ 4F  
TEL 03-5784-2277 FAX 03-5784-3036  
URL [www.sunrisejapan.com](http://www.sunrisejapan.com)

## 検査を始める前に必ずご確認ください



### 内容物

A 検査用力セット	1袋
B 抽出チューブ	1本
C 点滴キャップ	1個
D 抽出試薬容器 (0.3mLの抽出試薬を含む容器)	1個
E 滅菌綿棒 (検体採取用の使い切り綿棒)	1袋
F 本紙	1枚

### 別途 ご用意いただくもの

タイマー、時計もしくはストップウォッチ  
などで正確に時間を測ってください。

本紙裏面記載の「採取手順」に従って検体を採取し、  
「検査手順」に従って判定を行ってください。



## 検体採取の前にお読みください

- COVID-19簡易抗原(PCR)検査キットで正確な検査結果を得るためには検体の品質が重要です。
- 発症初期はウイルスの力が最も高くなります。
- 発症5日後に得られた検体は、陰性の結果をもたらす可能性が高くなります。
- また、不十分な検体採取方法は誤った結果をもたらす可能性があります。


### 採取手順 (鼻・のどどちらか選べます)

#### 鼻から採取

- ①パックから滅菌綿棒を取り出します。
- ②頭を70度後ろに傾けます。
- ③スワブを鼻孔から耳の外側の開口部に近い深さまで挿入します。
- ④スワブを回転させながらゆっくりと取り外します。

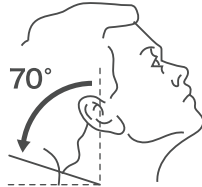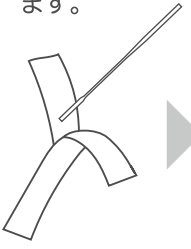


分泌物を吸収するためにそのまま  
**数秒間**  
お待ちください

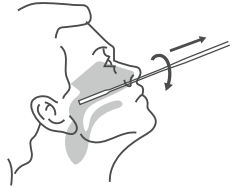


#### のどから採取



- ①パックから滅菌綿棒を取り出します。
- ②スワブを口内に挿入し、咽頭後部・扁桃腺 両方に綿棒をこすりつけます。

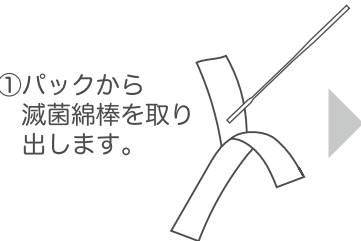


舌、歯、歯茎に触れないよう注意してください。

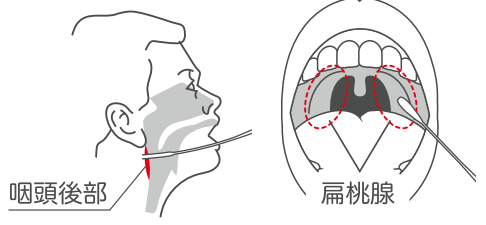



- ①抽出試薬容器のキャップを外し、抽出試薬を抽出チューブに移してください。
- ②綿棒を試薬入りチューブに入れます。綿棒をチューブの中で5回転させた後、底と側面に押し付けます。
- ③チューブの側面に押し当てて、綿棒にしみ込んだ液体を絞り出してキャップをしっかり閉めてください。

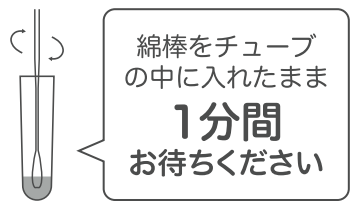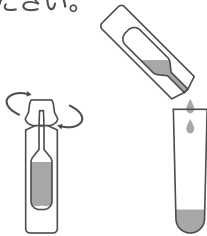

綿棒をチューブの中に入れてそのまま  
**1分間**  
お待ちください

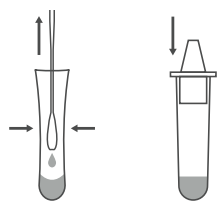

- ④袋から検査用カセットを取り出し、平らな面に置きます。
- ⑤チューブからサンプル口に検体を3滴垂らし、時間の計測を開始してください。

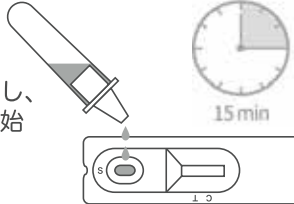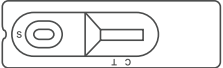

**注意**  
20分経過以降の結果は読み取らないでください。  
※20分後以降に、陽性結果であるTに赤い線が現れる場合がありますが、その線は『無効』となります。

## 色付きの線が現れるまで15分お待ちください

#### 検査結果の見方

陽性	陰性	無効
<p>CおよびTの赤い線が現れた場合抗原があることを示しています。</p>	<p>Cに赤色の線が現れ、Tに線が現れない場合、陰性を示します。</p>	<p>Cに赤色の線が現れなかった場合新しいキットにて再度採取してください。</p>